



Warnung

Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Als funkbasiertes System ist es nicht zur Meldung von vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen zugelassen.

Lieferumfang


| Produkt | Bestellnummer ¹ | Frequenz ¹ |
|--|----------------------------|-----------------------|
| AAL Profiline Türwächter incl. Batterie und vormontiertem Klinkenadapter VM22R, als Montageset mit Schlüssel und Umhängeband | HC-305 | 869,23 MHz |
| Bedienungsanleitung | HC-305-BA | |

¹Bestellnummer und Frequenz sind auf dem Typenschild aufgedruckt. Dieses befindet sich auf der Rückseite des Türwächter-Moduls.

Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit und auf Beschädigungen.

Hinweis: In dieser Beschreibung wird der **AAL Profiline Türwächter** abgekürzt als **Türwächter** bezeichnet.

Bild 1: Türwächter Montageset, Komponenten

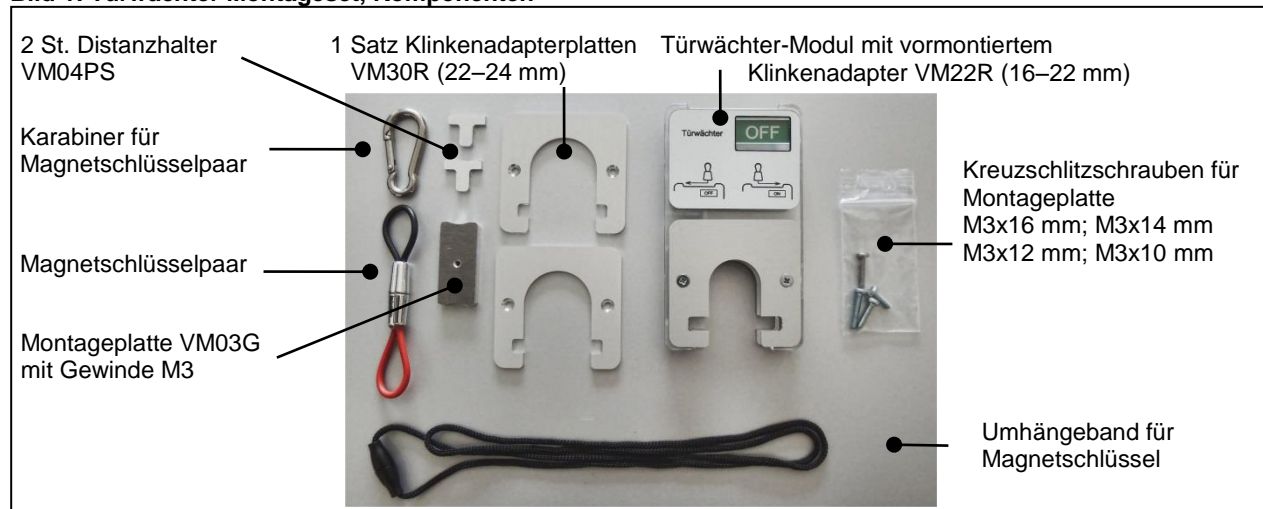

Verwendung und Funktion

Der Türwächter wird auf der Achse der Klinke montiert. Er dient dazu, das Öffnen der Tür über Funk an einen zugehörigen Rufempfänger zu melden. Das Niederdrücken der Klinke führt zur Schrägstellung des Moduls, wodurch ein Funkruf ausgelöst wird.

Inbetriebnahme

Der Türwächter wird betriebsbereit mit eingelegter Batterie ausgeliefert. Zur Erstinbetriebnahme muss dieser an einen zugehörigen AAL Profiline Empfänger eingelernt und ein Reichweitentest durchgeführt werden.

Rufmeldung abstellen

Der Türwächter sendet bei Auslösung eine einmalige Rufmeldung an den zugehörigen Empfänger. Eine evtl. erforderliche Abstellung des Rufes ist am Empfänger vorzunehmen. Ein Rückstellen des Funkrufes am Türwächter ist nicht möglich.

Sichere Reichweite der Funkverbindung prüfen

Die Funkreichweite entspricht den Anforderungen der technischen Prüfstelle der Krankenkassen. Innerhalb von Gebäuden kann mit ca. 30 m Reichweite gerechnet werden. Die Reichweite hängt wesentlich von den örtlichen und baulichen Gegebenheiten ab.

Vor erstmaliger Verwendung und Montage ist die störungsfreie Funkverbindung zu prüfen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie alle in der näheren Umgebung befindlichen elektronischen Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte wie Fernseher, Spielekonsolen und Computer **ein**.
2. Prüfen Sie die Funkmeldung zum Rufempfänger in ca. 5–10 m Zusatzabstand gegenüber dem vorgesehenen Gebrauchsabstand. Achten Sie darauf, dass die Meldung mit einer einzigen Rufauslösung ausgelöst wird!

Wichtig: Wenn in der Rufumgebung die Platzierung elektronischer Geräte verändert wird oder neue in Betrieb genommen werden, ist die Prüfung der Funkreichweite erneut durchzuführen.

Bedienung

Aktivieren / Deaktivieren

Zur Überwachung ist der Türwächter zu aktivieren (Bild 2).




Warnung

Der Magnetschlüssel zerstört die Daten von Magnetstreifenkarten. Deshalb den Schlüssel von solchen unbedingt fernhalten (z.B. vom Geldbeutel oder Karten in Taschen).

Der **aktive** Schlüssel ist der mit **roter** Schlaufe! Der Magnet mit **schwarzer** Schlaufe dient lediglich zur Aufnahme des roten Magnetschlüssels. Andernfalls wird der rote Schlüssel von metallischen Gegenständen angezogen.

1. Aktivieren (**ON**): Magnetschlüssel links bei „OFF“ auf die obere Schiebefläche aufsetzen und ganz nach rechts schieben, bis die Schrift „ON“ im vorderen Sichtfenster erscheint. Nach dem Aktivieren ist die Funktion durch Niederdrücken der Türklinke zu prüfen. Eine Rufauslösung sollte erfolgen.
2. Deaktivieren (**OFF**): Magnetschlüssel rechts bei „ON“ auf die obere Schiebefläche aufsetzen und ganz nach links schieben, bis die Schrift „OFF“ im vorderen Sichtfenster erscheint.

Bild 2: Aktivieren/Deaktivieren

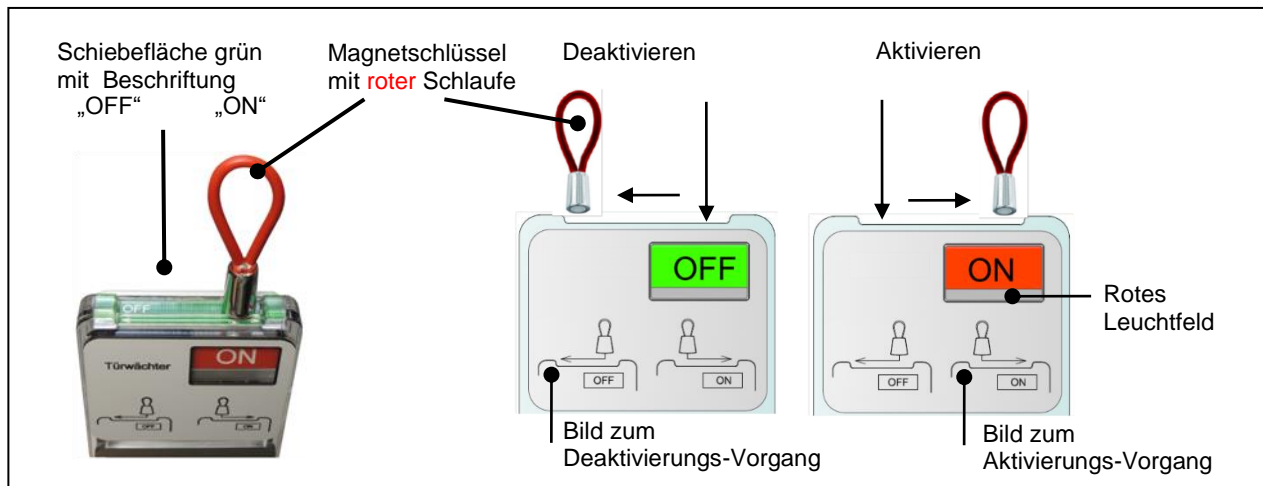

Regelmässige Massnahmen

Vorgeschlagen wird eine wöchentliche Besichtigung des Türwächters auf Beschädigungen und Prüfung der Signalisierung durch Auslösen eines Prüfrufes. Dabei auch prüfen, ob eine „Batterie schwach“-Meldung ausgegeben wird. Empfohlen wird zudem eine monatliche Kontrolle der Funkreichweite.



Wichtig

Die regelmässigen Überprüfungen sorgfältig durchführen. Verschlossene / beschädigte Teile sofort austauschen. Bei Beschädigung oder Funktionsmangel das System bis zur Reparatur nicht mehr verwenden.

Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel gem. DIN/EN 13727. Auf keinen Fall scheuernde / ätzende Reinigungsmittel verwenden.

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Betriebsfrequenz: | 869,23 MHz (sichere Sozialalarmfrequenz) |
| Auslösung: | Schrägstellung ab 9°, beidseitig |
| Anzeigen: | LED-Anzeige für Ruf und Batteriemeldung Anzeigefenster für ON/OFF |
| Stromversorgung: | Knopfzelle 3 V, Ausführung CR 2032 Betriebsdauer bei täglich einmaligem Gebrauch ca. 3 Jahre |
| Abmessungen: | 60 x 106 x 21 mm (BxHxT) |
| Gewicht | ca. 120 g |
| Schutzart | IP 40 |
| Konformität: | CE (RED RL, RoHS RL) |

Batteriewechsel



Wichtiger Hinweis

Nach einem Batteriewechsel ist immer die Rufauslösung und Funkreichweite wie bei einer Erstinbetriebnahme zu prüfen. Verbrauchte Batterien sind sachgerecht zu entsorgen.


„Batterie-schwach“-Meldung

Die rote Signalanzeige-LED des Türwächters blinkt bei einer Rufauslösung fünfmal. Eine „Batterie-schwach“ Meldung wird durch einmaliges Blinken angezeigt.

Erscheint eine „Batterie schwach“-Meldung, ist am betroffenen Türwächter innerhalb der nächsten Wochen die Batterie zu wechseln.

Bild 7: Batteriewechsel


1. Von der rückseitigen, weissen Deckplatte die zwei Kreuzschlitzschrauben lösen und aufheben. Die Deckplatte abheben.

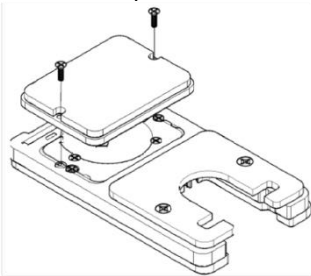

2. Darunter befindet sich das Sendemodul mit der Batterie



3. Die Batterie mit einem **nichtmetallischen** Gegenstand (z.B. Zahnstocher) aus der Halterung herausschieben und neue, Typ CR2032 einsetzen (+ Pol ist Oberseite)

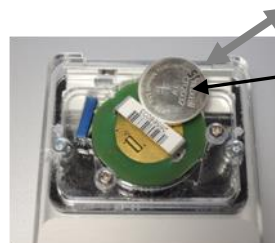

Kennzeichen des + Pols

4. Die Deckplatte so auflegen, dass sie bündig abschließt. Dann vorsichtig wieder anschrauben.

Wichtig: Die Deckplatte schließt nur bündig ab, wenn sich die vorstehende Nut des durchsichtigen Acrylteils auf der Entnahmeseite der Batterie befindet (sichert die Batterie gegen Herausrutschen).

Montage auf eine Türklinke

Der Türwächter wird zur Verwendung auf die Klinke einer zu sichernden Türe montiert.

Hinweis: Zur Anpassung an verschiedene Achsenausführungen von Klinken dienen unterschiedliche Klinkenadapter:

- Für runde Klinkenachsen von 16 –30 mm Durchmesser sind die Aluminiumadapter bereits vormontiert.
- Für andere Achsendurchmesser oder eckige Achsen siehe Tabellen 2 / 3.

Wichtig: Nach erfolgter Montage die Verdrehfestigkeit prüfen und einen Prüfluf auszulösen.

Bild 4: Klinkenmontage


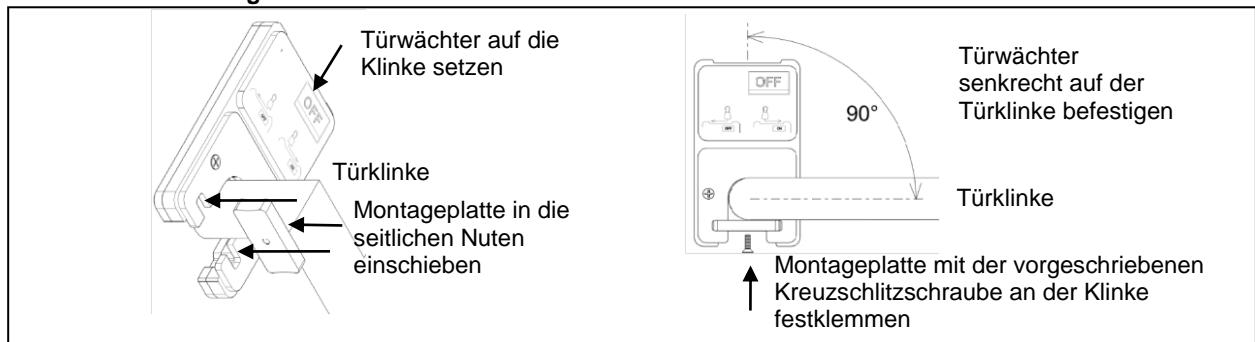


Bild 5: Montage anderer Klinkenadapter

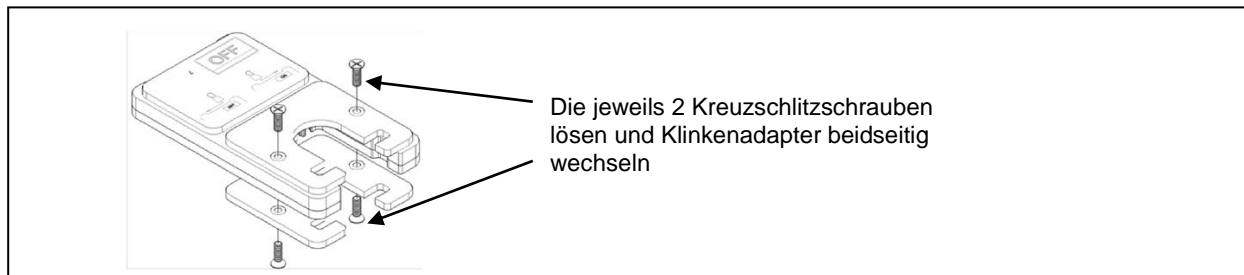

Erforderliche Distanzhalter (VM04PS) sind gegebenenfalls in die passenden Führungsnuten zu stecken

Bild 6: Einstecken der Distanzhalter (immer paarweise)

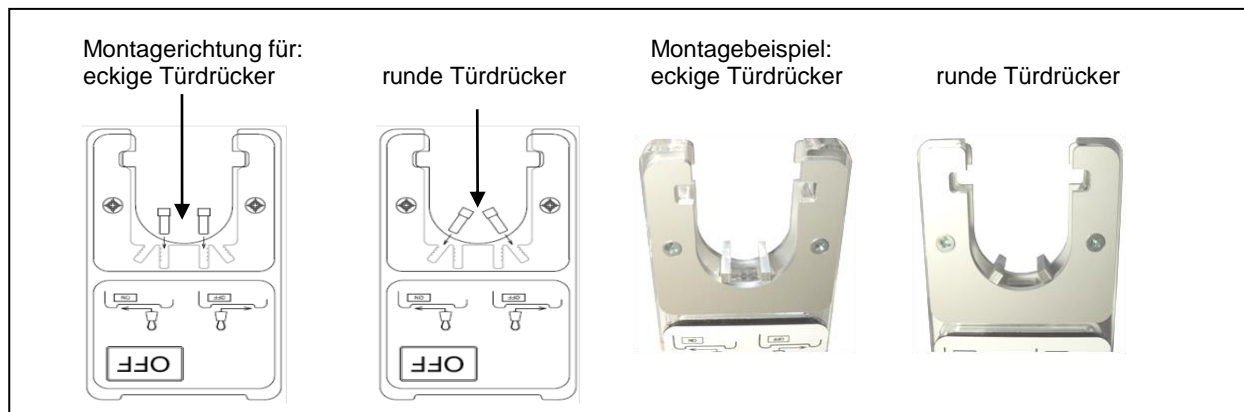


Tabelle 2: Montagevarianten für runde Türdrückerachsen

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Türdrücker | Ø 16 – 19 mm | Ø 20 – 22 mm | Ø 23 – 27 mm | Ø 28 – 30 mm |
| Klinkenadapter | VM22R ¹ | VM22R ¹ | VM30R | VM30R |
| Distanzhalter | | | VM04PS | |
| Schraube für Montageplatte | M3x16 mm | M3x12 mm | M3x14 mm | M3x14 mm |

Tabelle 3: Montagevarianten für eckige Türdrückerachsen

| | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Türdrücker | □ 22 – 24 mm | □ 24 – 25 mm | □ 25 – 28 mm | □ 28 – 30 mm |
| Klinkenadapter | VM30R | VM30E ² | VM30E ² | VM30E ² |
| Distanzhalter | VM04PS | VM04PS | VM04PS | entfällt |
| Schraube für Montageplatte | M3x12 mm | M3x10 mm | M3x12 mm | M3x10 mm |

¹Vormontiert

²Zubehör

Zubehör- und Ersatzteile¹

| Produkt | Bestellnummer |
|--------------------------------------|---------------|
| Sonderklinkenadapter (Adapter VM30E) | AAL-305X-01 |
| Ersatzschlüssel (Magnet) | AAL-305X-02 |
| Ersatz-Klinkenset | AAL-305X-03 |

¹Weitere Ersatzteile und Zubehör sind im Homecare Produktkatalog oder im AAL-Homecare Shop Ihres Händlers aufgeführt.

Gewährleistung

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen, oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen. Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff oder unsachgemäßer Behandlung. Sie gilt nicht für Verschleiss beweglicher oder Wechsel-Teile.

Serviceadresse

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten, oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die folgende Adresse:

AAL-Homecare Wahner-Str. 45 53859 Niederkassel Homepage: www.aal-homecare.com

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte, Altbatterien und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.



Konformität und gesetzliche Regelungen

Hiermit erklärt AAL Homecare, dass sich das Produkt soweit zutreffend in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV RL 2014/30/EU, der RED RL 2014/53/EU, und der RoHS RL 2011/65/EU befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie im Internet unter www.aal-homecare.com.



REACH Verordnung Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar.